



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD140



IMPORTANTE:**Máximo peso del usuario: 100 Kg**


El caminador Mini Roler está fabricado en aluminio.

Peso: 3,9 Kg.


Adecuado para su uso en interiores.

Desplegado

Para desplegar el caminador, presionar los puños (B) y empujar el caminador hacia delante (C), hasta que se abra completamente.

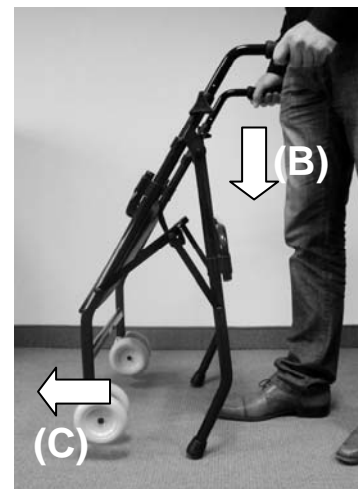**Plegado**

Para plegar el caminador, tirar hacia arriba el travesaño (A) tal como se muestra en la foto.

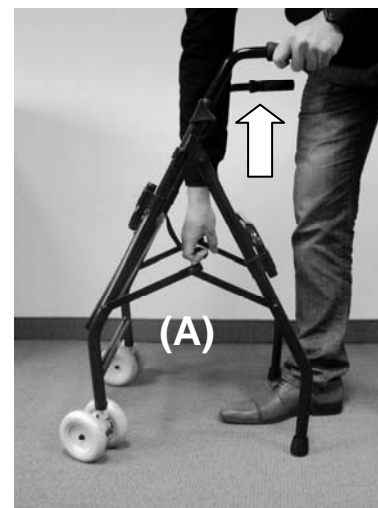

Asegurar que el caminador quede totalmente abierto

Ajuste de los puños y regulación de altura

Ponga los puños en los tubos del chasis del andador a la altura que desee, pase el tornillo por orificios de regulación de altura y apriete el pomo.

Seguridad

Cuando utilice este caminador recuerde que su estabilidad depende de que las ruedas y las conteras estén en contacto con el suelo y por consiguiente solo se debe utilizar el caminador Mini Roler sobre superficies planas y firmes.

Utilizar el caminador sobre otros pavimentos o superficies, o en rampas reducirá considerablemente su estabilidad.

Limpieza

No utilice detergentes abrasivos para limpiar el caminador.

Un paño suave y agua jabonosa tibia son normalmente suficientes para mantenerlo limpio.

Mantenimiento

Compruebe que las ruedas giran libremente y están en buen estado.

Verifique el estado de desgaste de las conteras, de la parte trasera del andador.

Recuerde que habitualmente se enganchan hilos, pelos y otros residuos en los ejes de las ruedas impidiendo que giren libremente.

Periódicamente compruebe tornillos y tuercas.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



Fabricado por:
HUGE GHANCE INTL. Ltd
NA4 MY PHUOE IND. PARK
DONG PROVINCE VIETNAM